


Montage- und Bedienungsanleitung für Stockhalter SNAP 3

Stockhalter zur Montage an Standard-Rollatoren oder Rollstühlen
mit einem Rohrdurchmesser von 22 oder 25 mm.

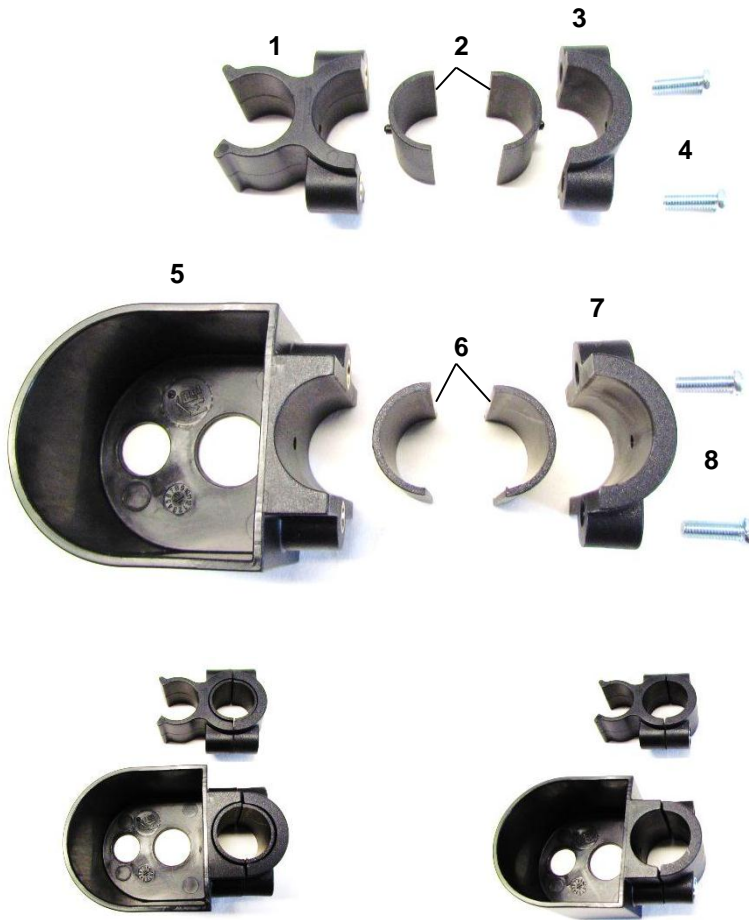

Inhalt:

- 1 – Stockhalteklammer für 25mm Rohr
- 2 – Adapterstücke für 22mm Rohr
- 3 – kleine halbe Schelle für 25mm Rohr
- 4 – 2x Schraube M5 x 15
- 5 – Stockhaltebecher für 25mm Rohr
- 6 – Adapterstücke für 22mm Rohr
- 7 – große halbe Schelle für 25mm Rohr
- 8 – 2x Schraube M5 x 15



Abb. 1

Montage am **22mm** Rohr

Abb. 2

Montage am **25mm** Rohr

1. Befestigen Sie den Stockhaltebecher mit Hilfe der großen Schelle und den mitgelieferten Schrauben unten am Rollator oder Rollstuhl. Bei Rohrdurchmesser 22mm mit den Adapterstücken (**Abb. 1**), für Rohrdurchmesser 25mm werden die Adapterstücke entfernt (**Abb. 2**).
2. Befestigen Sie die Klammer mit der kleinen Schelle und den mitgelieferten Schrauben oben am Rollator. Bei Rohrdurchmesser 22mm mit den Adapterstücken (**Abb. 1**), für Rohrdurchmesser 25mm werden die Adapterstücke entfernt (**Abb. 2**). Bei Rollstuhlmontage verwenden Sie oben bitte unseren **SNAP-Haltegurt**.
3. Stellen Sie den Stock in den Becher unten und fixieren Sie ihn oben in der Klamme.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden Stockhalters **MPB® SNAP 3** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.