


EINSTELLUNG DER BREMSWIRKUNG

Bei schlechter Bremswirkung mit Innensechskantschlüssel Nr. 3 justieren. Der geeignete Abstand zwischen Bremsklotz und der Laufdecke des Rades beträgt 1 mm.

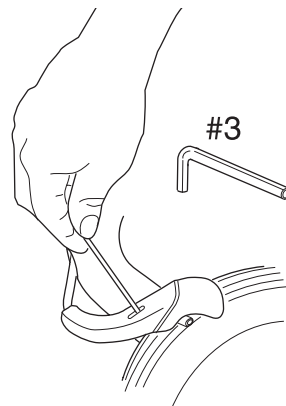

DOLOMITE MELODY, SOPRANO

WARTUNGSANWEISUNG

Um die Funktion und die Sicherheit des Rollators aufrechtzuerhalten, sollten Sie regelmäßig folgende Schritte durchführen:

- Den Rollator mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen und einem Tuch abtrocknen. Auch die Räder müssen saubergehalten werden.
- Achten Sie auf den festen Sitz von Schrauben und Muttern.
- Wenn Ihr Rollator nicht einwandfrei funktioniert, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Verschreiber. Ein defekter Rollator darf nicht verwendet werden.

DOLOMITE haftet nicht, wenn Arbeiten am Rollator (Anpassungen, mangelhafte Reparaturen) ausgeführt werden, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Garantiezeit: 5 Jahre. Die Garantie gilt nur für die Originalteile von **DOLOMITE**.



Das maximal zulässige Nutzergewicht beträgt für **DOLOMITE MELODY** 135 kg, und für **DOLOMITE SOPRANO** 160 kg.

ANGABEN ZUR ENTSORGUNG VON PRODUKT UND VERPACKUNG:


Nach der Produktlebenszeit ist das Produkt mit Zubehör und Verpackung ordnungsgemäß zu entsorgen. Die einzelnen Teile können entsprechend der Materialbezeichnung getrennt und entsorgt werden.

Dem Typenschild von **DOLOMITE MELODY, SOPRANO** können Sie alle wichtigen technischen Daten entnehmen.

- 1: Artikelnummer
- 2: Artikelbezeichnung
- 3: Seriennummer
- 4: Herstellungsdatum
- 5: Maximale Belastung
- 6: Bitte Bedienungsanleitung beachten!
- 7: Name des Herstellers

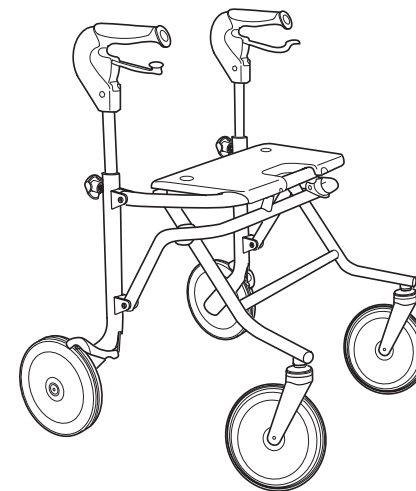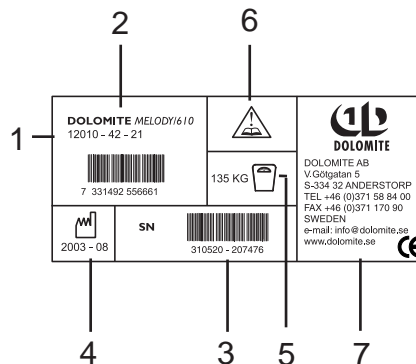

DOLOMITE MELODY
Max. Belastung 135 kg

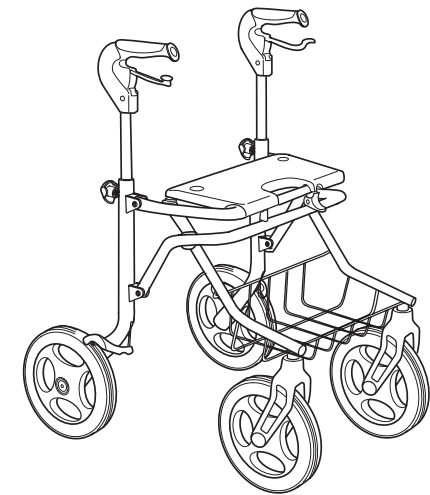

DOLOMITE SOPRANO
Max. Belastung 160 kg

DOLOMITE AB, V. Götgatan 5, 334 32 ANDERSTORP, TEL +46 (0)371 58 84 00, FAX +46(0)371 170 90
E-mail: info@dolomite.se, www.dolomite.se



AQUATEC GMBH, POSTFACH 1119, ALEMANNENSTRASSE 10, D-88305 ISNY
Tel.: 0049-7562 7000

82181 03-09:1

www.c-tryck.se



BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie bitte vor Anwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Der Rollator ist für den Gebrauch drinnen und draußen bestimmt.

SICHERHEIT

- Es ist untersagt, auf dem Rollator zu stehen und diesen für den Personentransport anzuwenden.
- Wenn Sie auf dem Rollator sitzen, müssen beide Bremsen festgestellt sein.
- Der Rollator muss beim Gehen vollständig ausgeklappt sein. Bitte beachten Sie, dass der Rollator nur als Gehhilfe verwendet werden darf.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei abschüssigem Untergrund.
- Seien Sie vorsichtig, wenn der Korb schwer belastet ist.
Max. Last im Korb: 10 kg **DOLOMITE MELODY**, 12 kg **DOLOMITE SOPRANO**. Die Last ist nur im Korb oder auf der Lastfläche **DOLOMITE SOPRANO** zu transportieren.




FAHRBEREITER ZUSTAND

1. Klappen Sie den Rollator auseinander, indem Sie auf das Sitzrohr drücken. Es ist wichtig, dass die Faltsicherung verriegelt ist, ehe der Rollator angewendet wird.
2. Der Sitz ist hochklappbar, um den Lauffbereich zu erweitern und somit das Gehen zu erleichtern.

ZUSAMMENKLAPPEN

Falls ein Korb angewendet wird, muss dieser vor dem Zusammenfallen des Rollators abmontiert werden.

1. Drücken Sie die Sicherung nach unten.
 2. Ziehen Sie das Sitzrohr nach oben.
 3. Der Rollator kann in zwei Positionen zusammengeklappt werden.
- A Um den Rollator zusammengeklappt abzustellen, muss er in die erste Position gebracht werden.
- B Um den Rollator zu transportieren, wird empfohlen, diesen noch weiter in die innerste Position zusammenzuklappen. Bitte beachten Sie, dass der Rollator dann nicht länger stehen kann.

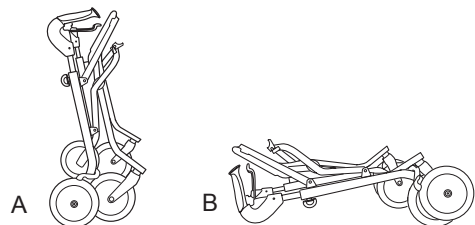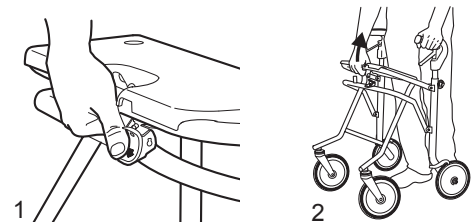
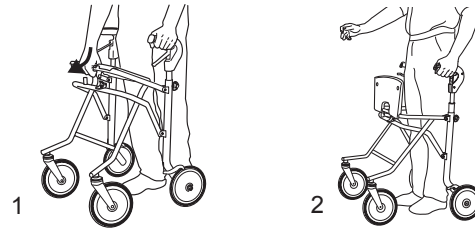


BREMSEN

Zum Bremsen beim Fahren ziehen Sie beide Bremshebel nach oben.


FESTSTELLBREMSE

1. Zur Feststellung des Rollators drücken Sie den Bremshebel leicht nach unten, bis dieser mit einem Klickgeräusch einrastet. Es ist wichtig, dass beide Bremsen festgestellt werden.
2. Die Bremse wird entriegelt, indem der Handgriff wieder nach oben gezogen wird.

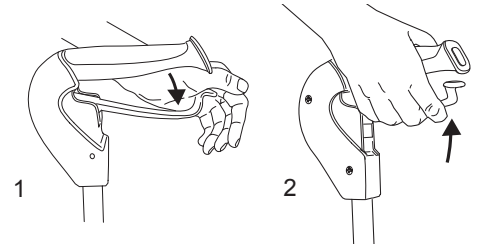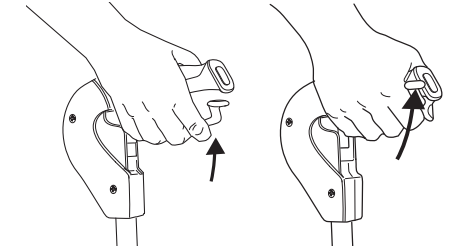



MONTAGE DES TABLETTS UND DES KORBS

A **DOLOMITE MELODY**
B **DOLOMITE SOPRANO**

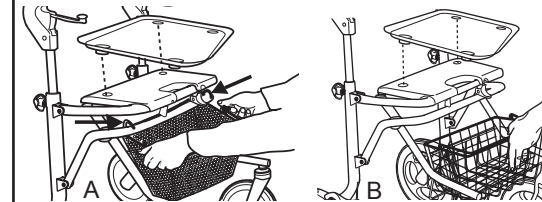

EINSTELLUNG DER HANDGRIFFE

1. Lösen Sie die Drehknöpfe zur Höhenverstellung, ohne diese gänzlich abzuschrauben.
2. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, in der Regel bis zu den Handgelenken.
3. Für eine bequemere Position der Hände oder bei Bewegungseinschränkungen der Handgelenke können die Handgriffe nach innen gewinkelt werden.
4. Ziehen Sie die Drehknöpfe fest.

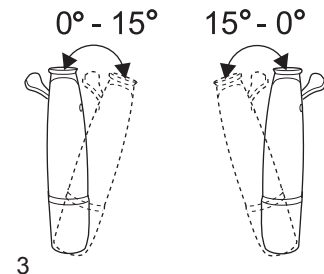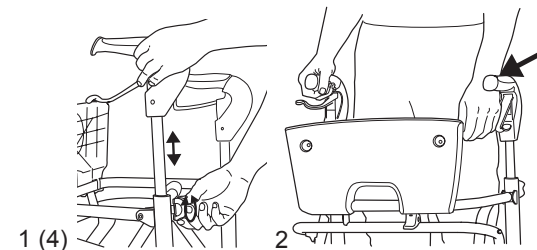

Besteht die Gefahr, dass der Anwender die Drehknöpfe abschraubt, sind diese mit Schlossschrauben zu ersetzen (Zubehör).