

BORT Generation Knieorthese


Art. Nr. 215 400

Kniegelenk-Softorthesen unterstützen geschädigte Gewebestrukturen (Gelenk, Bänder, Kapseln, Knorpel). Die BORT Generation Knieorthese unterstützt dabei die Haltefunktion der Bänder, stabilisiert und entlastet so das Gelenk.




Gebrauchsanweisung:


Vor dem Anlegen der Knieorthese kann vom Techniker bei Bedarf die gewünschte Extensions- und Flexionslimitierung eingestellt werden. Hierzu müssen an der medialen und lateralen Gelenkschiene die beigefügten Wurmschrauben in die entsprechende Gewindebohrung eingedreht werden.

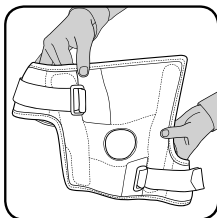


Zum Anlegen die beiden Klettbänder und die unterliegenden Polsterbänder der BORT Generation Knieorthese zunächst öffnen.

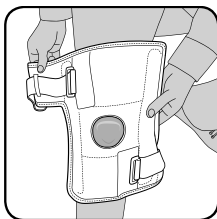

Die Knieorthese im Sitzen von oben her auf das gestreckte Kniegelenk auflegen, so dass die Patellaussparung direkt um die Kniescheibe liegt.

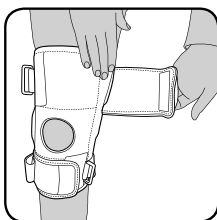

Anschließend die Polsterbänder um Ober- und Unterschenkel führen und verschließen.

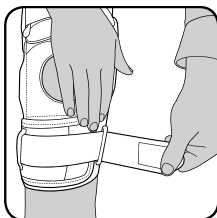

Zuletzt die beiden Klettbänder durch die Umlenkschlaufen führen und mit der gewünschten Spannung schließen.

Indikationen:

Degenerative Erkrankungen, z. B. leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen.

Kontraindikationen:

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Materialzusammensetzung:


84 % Polyamid, 16 % Elasthan

Wichtiger Hinweis:

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl in Hand oder Arm die Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie umgehend ihren Arzt aufsuchen.

Größeneinteilung:

Größen	d-Maß	f-Maß
small	26 – 29 cm	32 – 36 cm
medium	29 – 33 cm	36 – 40 cm
medium plus	29 – 33 cm	40 – 44 cm
large	33 – 37 cm	40 – 44 cm
large plus	33 – 37 cm	44 – 48 cm
x-large	37 – 41 cm	44 – 48 cm
x-large plus	37 – 41 cm	48 – 52 cm
xx-large	41 – 45 cm	52 – 56 cm
xx-large plus	41 – 45 cm	56 – 60 cm
xxx-large	45 – 49 cm	60 – 64 cm
xxx-large plus	45 – 49 cm	64 – 68 cm

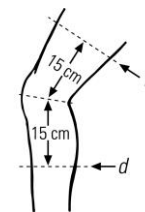**Pflegeanleitung:**

Die Orthese mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

