



Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Dynair® Twist 2er-Set

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Dynair® Twist 2er-Sets.

Mit dem Dynair Twist 2er-Set haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Die neuen Dynair Twist gibt es im Doppelpack und lassen jedes Stabilisationstraining interessanter und schwieriger werden. Durch eine gewölbte Platte an der Unterseite muss die gelenkumspielende Muskulatur je nach Einsatzbereich die Bewegungen der Dynair Twist ausgleichen und in eine gerade Position bringen.

Außerdem können gezielte Rotationsübungen aus dem Gelenk heraus erarbeitet werden. Hervorragend für Stützübungen im Bereich Schultergelenk und für die untere Extremität. In Bauch-, Rückenlage oder auch im Stand einsetzbar.

Anwendungsbereiche: Fitness, Therapie (Rehabilitation), Funktionelles Training, Leistungssport, Vereins- und Schulsport

Kleine Gerätekunde:

Das Dynair Twist ist aus hochwertigem Roton mit Nadelventil hergestellt.

Durchmesser: ca. 20 cm

Temperatur-Beständigkeit:

Das Dynair Twist ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann das Dynair Twist problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.

Das Dynair Twist ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pflege:

Zum Reinigen des Dynair Twist 2er-Sets können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an. Das Dynair Twist ist wasserfest.

Aufpumpen:

Das Dynair Twist wird optimal mit Luft befüllt ausgeliefert.

Im Bedarfsfall können Sie die Luftmenge mit einer Nadelventilpumpe (z.B. der TOGU Pumpe oder mit jeder herkömmlichen Fußballpumpe) nachträglich regulieren.

Bitte ziehen Sie das Ventil zwischen Daumen und Zeigefinger hoch, damit die Nadel nicht in die untere Seite des Ballkissens sticht.

Lagerung:

Bitte lagern Sie ihr Dynair Twist immer flach liegend.

