


# Montageanleitung für Stockhalter UNIVERSAL 22

Unser Stockhalter UNIVERSAL 22 ist für die waagerechte oder senkrechte Montage am Rückenrohr oder Auftrittrohr eines Rollstuhls geeignet. Er setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

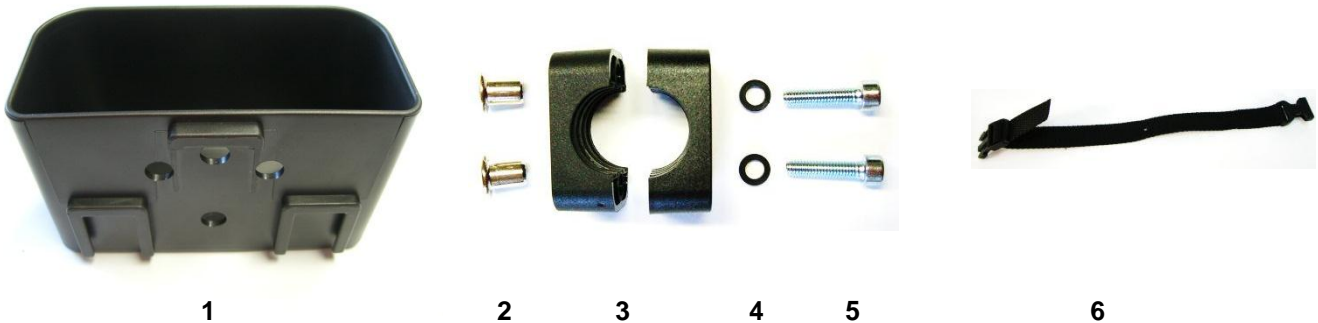

1. Stockhaltebecher
2. Hülsenrundmutter
3. Kunststoffschelle 22
4. Unterlegscheibe
5. Innensechskantschraube
6. Haltegurt

## Montage:

1. Stecken Sie die beiden Rundmuttern in die dafür vorgesehenen Löcher, entweder zur waagerechten oder senkrechten Montage.
2. Befestigen Sie nun den Stockhaltebecher mit der beigefügten Schelle, den Unterlegscheiben und den Schrauben am Rückenrohr oder am waagerechten Auftrittrohr. Ohne Verwendung der Unterlegscheiben kann sich der Stockhalter auf dem Rohr drehen!
3. Sollten Sie den Stockhalter an einem waagerechten Rohr befestigen, so ist es empfehlenswert, in die Schelle ein Stück Gummi (z. B. ein Stück alten Schlauch) einzulegen, um so ein Drehen auf dem Rohr zu verhindern.
4. Befestigen Sie den beigefügten Haltegurt an der obersten Schraube der Rückenlehnenbespannung.



## Bedienungsanleitung:

Stellen Sie Ihren Gehstock unten in den Stockhaltebecher und fixieren Sie ihn oben mit dem Haltegurt.



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB® Stockhalters UNIVERSAL 22 und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**