

Badewannensitz *Atlantic* ohne Rückenlehne

Gebrauchsanleitung



Lesen Sie die aufmerksam die Gebrauchsanleitung, bevor Sie den Badewannensitz *Atlantic* erstmalig in Gebrauch nehmen und montieren. Bewahren Sie diese auf, so dass sie für die spätere Verwendung zur Verfügung steht.

Zweckbestimmung


Der Badewannensitz *Atlantic* ermöglicht das Duschen und Abtrocknen in der Sitzposition unterhalb des Badewannenrandes und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die Anti-Rutsch-Struktur, die ergonomische Form und das Abflussloch in der Sitzoberfläche ermöglichen eine sichere Körperreinigung.

Indikation

Personen, die aufgrund von Lähmungen oder Gelenkerkrankungen eingeschränkt sind, dient der Badewannensitz als Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne. Das Duschen im Sitzen ist geeignet für Menschen, die nicht in der Lage sind, während der Körperreinigung zu stehen.

Montage/Anleitung

1. Entnehmen Sie die Einzelteile aus dem Karton und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
2. Schieben Sie die Gummi-Aufsätze auf die kurzen Enden der gebogenen Badewannenaufsätze, an denen sich bereits Anti-Rutsch-Pads befinden.
3. In die offenen Enden der Aufsätze schieben Sie jeweils einen Kunststoffeinsatz. Nun stecken Sie die Aufsätze in die Öffnungen der unter dem Sitz befindlichen Rohre.
4. Wenn Sie die Breite des Sitzes und der Aufsätze an die Badewanne angepasst haben, fixieren sie die Halterung unterhalb des Sitzes mit den vier Schrauben.
5. Setzen Sie den Badewannensitz auf den Badewannenrand.

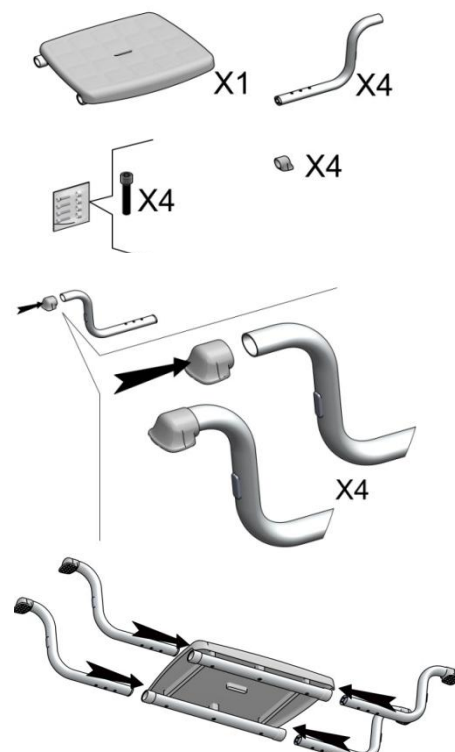

Sicherheitshinweise



1. Überprüfen Sie vor **jeder** Benutzung den sicheren Halt des Sitzes auf dem Badewannenrand und setzen Sie diesen vorsichtig auf– Klemmgefahr!
2. Die Aufsätze und die an daran befindlichen Anti-Rutsch-Pads sollten eng an der Badewannenwand an- und auf dem Badewannenrand aufliegen, um sicher zu stellen, dass der Badewannensitz nicht wegrutschen kann.
3. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie den Badewannensitz benutzen!
4. Lehnen Sie sich nicht nach hinten, der Badewannensitz hat keine Rückenlehne- es besteht Verletzungsgefahr!
5. Setzen Sie sich immer auf die gesamte Sitzfläche!
6. Stellen Sie sich nicht auf den Badewannensitz!
7. Die maximale Belastbarkeit beträgt 125 kg!

Reinigung

Sie sollten den Badewannensitz *Atlantic*, der zur Wiederverwendung bestimmt ist, nach jeder Benutzung reinigen und regelmäßig desinfizieren. Das ist bei der Nutzung und beim Wiedereinsatz durch einen anderen Patienten/durch eine andere Person zwingend erforderlich! Spülen Sie den Badewannensitz *Atlantic* mit warmem Wasser ab und verwenden Sie für die Reinigung eine milde Seifenlauge. Trocknen Sie den Badewannensitz mit einem weichen Tuch und achten Sie im Badezimmer auf eine gute Belüftung. Die Desinfektion kann mit einem handelsüblichen Mittel gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden, z. B. Descosept AF. Der Badewannensitz besteht aus den Materialien, die gegen Korrosion geschützt und unempfindlich gegen handelsübliche Desinfektions- und Reinigungsmittel sind. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel sowie Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Kontraindikation

Die Verwendung des Badewannensitzes *Atlantic* ist ungeeignet bei starken Gleichgewichts- und Wahrnehmungsstörungen sowie bei Verlust der Gliedmaßen an den Beinen oder Armen.

Lagerung

Während der Nutzung im Bad auf dem Badewannenrand, muss für eine gute Lüftung gesorgt werden, um der Schimmelbildung auf dem Badewannensitz vorzubeugen. Zur Lagerung des Badewannensitzes *Atlantic*, wenn dieser nicht genutzt wird, muss dieser komplett trocken sein. Danach bewahren Sie diesen in dem mitgelieferten Polybeutel und Karton an einem trockenen und lichtgeschützten Ort auf.

Wartung

Der Badewannensitz *Atlantic* ist wartungsfrei. Sollten Sie Schäden oder Veränderungen am Material feststellen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Benutzen Sie keinen defekten Badewannensitz *Atlantic*!

Technische Daten/Maße und Gewicht (Material: eloxiertes Aluminium, Polypropylen, Gummi), Art. 13169048

Höhe (vom Badewannenrand bis zur Sitzfläche):	18cm
Breite (gesamt):	77 cm
Sitzfläche (Tiefe x Breite):	30 x 37 cm
Gewicht:	1,5 kg
max. Belastbarkeit:	125 kg

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



Rehaforum Medical GmbH, Daimlerstr. 12a, 25337 Elmshorn,
Tel.: +49 4121 473312 www.rehaforum.com

