


Montage- und Bedienungsanleitung für STOCKHALTER FÜR GEMINO

Mit dieser Anleitung erhalten Sie unseren STOCKHALTER FÜR GEMINO speziell für den Rollator Handicare Gemino. Vorteil des Original-MPB-Stockhalters für Handicare Gemino ist, dass er seitlich kaum aufrägt und so der Rollator kaum breiter wird. Zur Montage fahren Sie bitte mit den folgenden Punkten fort:

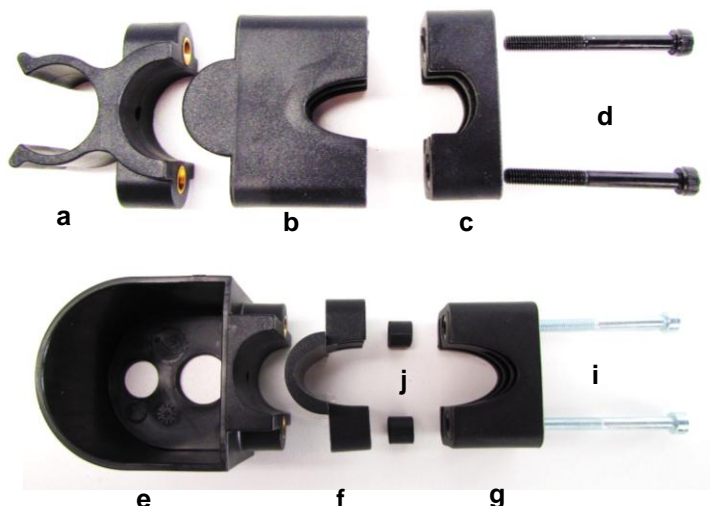

Inhalt STOCKHALTER FÜR GEMINO:

1 – STOCKHALTER FÜR TOPRO

- a. Stockhalterklemme
- b. obere halbe Schelle vorne
- c. obere halbe Schelle hinten
- d. 2x Schraube M5 x 50
- e. Stockhaltebecher
- f. untere halbe Schelle vorn
- g. untere halbe Schelle hinten
- h. 2x Schraube M5 x 45 (werden nicht benötigt)

2 – zusätzlich zur Montage am Gemino

- i. 2 x Schraube M5 x 50
- j. 2 x 8mm Distanzhülse



Montage Stockhalter für Gemino oben:

Die Montage des oberen Stockhalters erfolgt so, wie in der Anleitung Stockhalter für Topro beschrieben.



Montage Stockhalter für Gemino unten:

Nehmen Sie hierfür die zusätzlich mitgelieferten längeren Schrauben M5 x 50 und die Distanzhülsen. Fahren Sie weiter fort mit der Anleitung Stockhalter für Topro.

Bedienungsanleitung:

Stellen Sie Ihren Gehstock unten in den Stockhalter und fixieren Sie ihn oben.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB® STOCKHALTER FÜR GEMINO** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.