

Gebrauchsanweisung

EcoKiss Spezialkissen – zur Unterstützung der richtigen Sitzposition

Eine aufrechte Sitzhaltung ist nicht nur von einer ausreichenden Beweglichkeit und Flexibilität der Wirbelsäule abhängig. Der Grad der Beckenkipfung ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Eine eingeschränkte Beckenkipfung, wie z.B. bei einer Hüftarthrodese oder Hüftankylose, hat oft eine falsche Sitzhaltung mit langfristigen Schäden für die Wirbelsäule zur Folge. Das gilt ebenso für Kontrakturen der Hüfte nach Totalendoprothese (TEP). Die EcoKiss Spezialkissen können diese Fehllhaltung ausgleichen. Diese Kissen können für eine korrekte Beckenkipfung und Sitzhaltung sorgen.

Indikationen

- Bewegungseinschränkungen der Hüfte
- Hüftankylose
- nach Hüft-Totalendoprothese oder -Gelenkversteifung
- Bandscheibenprobleme (EcoKiss ArthroDisc)

Nicht anwenden bei schweren Sensibilitätsstörungen oder anderen Erkrankungen im Aufsitzbereich, Dekubitus im Aufsitzbereich.



Wichtige Hinweise

- Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
- Ein evtl. Abfärben auf Kleidung ist kein Reklamationsgrund und sollte sich nach der ersten Wäsche verlieren

Materialien

- Innenkern: Schaumstoff
- Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss
- Bezug ArthroFit Basic/ArthroDisc: Baumwoll-Mischgewebe
- Bezug ArthroFit Vario: PES Velours
- Rutschfeste Unterseite (Polyurethan-Streifen)
- Tragegriff: Synthetisches Gurtband; Kunststoff

Pflege- und Waschinweise

- Bezüge Basic / Disc 
- Bezug Vario 
- Leichtes Ausbluten beim Waschen ist möglich und kein Reklamationsgrund!
- Den Bezug möglichst separat waschen und vor dem Waschen auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
- Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durch trocknen lassen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Werkmeister GmbH + Co. KG 

Eschweger Straße 10 • D-37281 Wanfried

Fon +49 (0) 5655 9899-0

info@werkmeister-gmbh.de

Fax +49 (0) 5655 9899-22


www.werkmeister-gmbh.de

QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

70582/Stand 16.09.11

EcoKiss ArthroFit Basic

Arthrodesenkissen mit Tragegriff
(einseitig abgeschrägt)

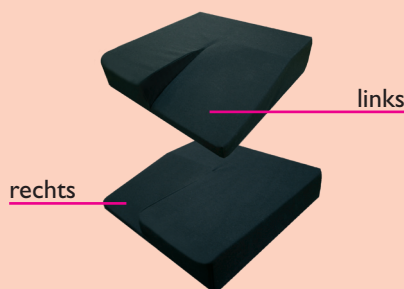


Mit abgeschrägter Kante für mehr Sitzkomfort.

Art. Nr.	Breite/Tiefe/Höhe	Farbe
2601 40408/links oder rechts	40 x 40 x 8 : 2 cm	Schwarz
2601 42420/links oder rechts	42 x 42 x 10 : 3 cm	Schwarz
2601 44442/links oder rechts	44 x 44 x 12 : 4 cm	Schwarz

EcoKiss ArthroFit Vario

Arthrodesenkissen mit Wechselkeil und Tragegriff
(abgeschrägt/variabel)

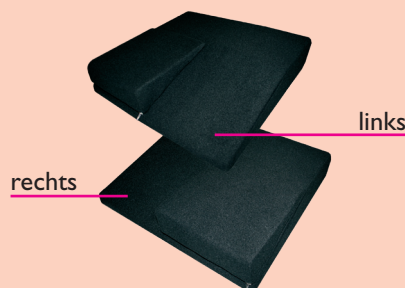


Mit abgeschrägter Kante für mehr Sitzkomfort.

Art. Nr.	Breite/Tiefe/Höhe	Farbe
2701 40408	40 x 40 x 8 : 2 cm	Schwarz
2701 42420	42 x 42 x 10 : 3 cm	Schwarz
2701 44442	44 x 44 x 12 : 4 cm	Schwarz

EcoKiss ArthroDisc

Arthrodesenkissen bzw. Bandscheibenkissen mit Tragegriff
(beidseitig abgeschrägt)

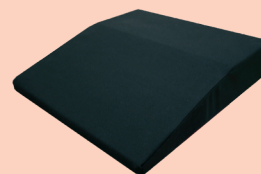

Art. Nr.	Breite/Tiefe/Höhe	Farbe
2801 40408	40 x 40 x 8 : 2 cm	Schwarz
2801 42420	42 x 42 x 10 : 3 cm	Schwarz
2801 44442	44 x 44 x 12 : 4 cm	Schwarz

Werkmeister[®]