

Duschhocker DHB-250

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses.
Der Duschhocker DHB 250 ist ggf. unter Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschhockers. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.



Lieferumfang

Der Duschhocker wird montiert in einem Karton geliefert.

- 1 Verpackungs- und Transportkarton
- 1 Duschhocker
- 4 Stuhlbeine (teleskopisierbar)

Indikation

Der Duschhocker bietet Person mit eingeschränkter Stehfähigkeit beim Duschen eine Sitzgelegenheit.

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschhockers ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr DHB 250 unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

- Achten Sie darauf, dass der Duschhocker stets fest und sicher auf allen vier Füßen steht.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- Besondere Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, besonders dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Duschhockers gegeben ist.
- Das Kippisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen vergrößert werden.
- Falls Sie sich selbst nicht ausreichend halten können, bitten Sie eine Hilfsperson um Unterstützung.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Höhenverstellung der Stuhlbeine

Die Sitzhöhe kann durch Höhenverstellung der Stuhlbeine dem Patienten individuell angepasst werden.

Drücken Sie dazu den Federknopf am Stuhlbein in das Teleskoprohr.

Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position.

Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet.

Sturzgefahr!

Überprüfen Sie ob alle Stuhlbeine auf der gleichen Höhe eingestellt sind.



Reinigung

Der Duschhocker sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Dieser kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden oder bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Technische Daten

Duschhocker	DHB 250
Material	Aluminium / HDPE
Farbe	Silber / Weiss
Sitzbreite (cm)	56
Sitztiefe (cm)	41
Sitzhöhe (cm)	44-53
Gewicht (kg)	3
Max- Belastbarkeit (kg)	250

Wartung

Der Duschhocker ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschhocker defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-94790

Telefax: +49 (0) 5254- 9479 499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler: